



84296

יוני 2023

דיגום נכון לבדיקות היריון בחלב

- יש לוודא כי עברו לפחות 60 ימים מההמלטה האחרונה ו-28 ימים מההזרעה האחרונה
- לדגום רק למבחנות נקיות של 15 מ"ל המיועדות לבדיקות היריון
- משתמשי נעה** יוצרים קובץ דרך אייקון 'בדיקות היריון בחלב' (צורה של מבחנה), מזינים את הפרטים ולוחצים על 'הצג ביומן', ואז רושמים על כל מבחנה את מס' המבחנה לפי הרשימה שנפתחת. שולחים את הרשימה למאל"ה (טרם משלוח המבחנות).
- יצרנים שלא משתמשים בנעה** יצרפו לדגימות רשימה של מספרי הפרות ומס' ימים מההזרעה, ויסמנו את מספרי הפרות על המבחנות
- יש לסמן על המבחנות בטוש לא מחיק (כחול/שחור). לא לסמן את מספרי הפרות על המכסים של המבחנות
- מומלץ להוסיף טבליה של חומר משמר לכל מבחנה
- יש לדאוג לכך שהדגימות יישמרו בקירור עד הגעה למעבדה (לא להקפיא)

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il